



PAUL[®] GLAUCOMA IMPLANT


Un paso adelante en el
desarrollo de implantes para
el Glaucoma

¿POR QUÉ PAUL® IMPLANT ES UN DISPOSITIVO DE DRENAJE ÚNICO?

PAUL® GLAUCOMA IMPLANT

Micro - tubo

- **Diámetro interno pequeño:** Crea una alta resistencia al flujo y protección contra la hipotonía temprana
- **Diámetro externo pequeño:** Ocupa menos espacio en la cámara anterior y minimiza los riesgos de erosión del tubo y contacto corneal

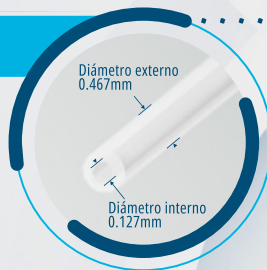

Diseño de plato optimizado

- **Superficie óptima de la placa:** Más área disponible para la filtración acuosa
- **Forma ideal de drenaje:** Menor área de filtración cubierta por los músculos rectos



Composición avanzada del dispositivo

- **Silicona de grado médico patentada:** Crea un dispositivo con un nuevo nivel de flexibilidad para facilitar el proceso de implantación
- **Dispositivo flexible:** Menor rigidez y disminuye tanto la microabrasión como la cicatrización excesiva de la herida.



RESULTADOS DEL ESTUDIO

“Los resultados del tratamiento con PAUL® Glaucoma Implant para controlar la presión intraocular en ojos con glaucoma refractario concluyeron que el mismo resulta ser una derivación de tubo novedosa y que ofrece algunas ventajas potencialmente significativas sobre otras válvulas disponibles actualmente en el mercado. Dichos resultados encontraron seguridad y eficacia prospectivas comparables -en una muestra relativamente grande- como los estudios publicados anteriormente de implantes actualmente disponibles, 1 año después de la cirugía en ojos con glaucoma refractario”.¹


En este estudio, “La medida de resultado primaria fue el fracaso, definido prospectivamente como una reducción de la PIO de más de 21mmHg o menos del 20% con respecto al valor inicial preoperatorio en 2 visitas consecutivas, 3 meses o más después de la cirugía; hipotonía tardía persistente, definida como PIO inferior a 6 mmHg en 2 visitas consecutivas después de 3 meses; cirugía adicional de glaucoma; pérdida de la visión de la percepción de la luz; o extracción del implante por cualquier motivo.

El éxito completo se definió con una PIO no medicada de 21 mmHg o menos y más de 5mmHg y reducida en un 20% o más desde el inicio de las visitas de 6 y 12 meses. El éxito calificado se definió de manera similar e incluyó ojos que recibieron tratamiento médico para reducir la PIO”.¹


Estas definiciones son consistentes con las Directrices de la Asociación Mundial de Glaucoma publicadas.²


Como conclusión: Se observaron reducciones significativas en los medicamentos utilizados para la PIO y el Glaucoma después de un 1 año de implantación de PAUL® . La tasa de fracaso fue el 5%, la tasa de éxito completo fue del 69% y la tasa de éxito calificado fue del 93%.

Reducción de la presión intraocular post cirugía

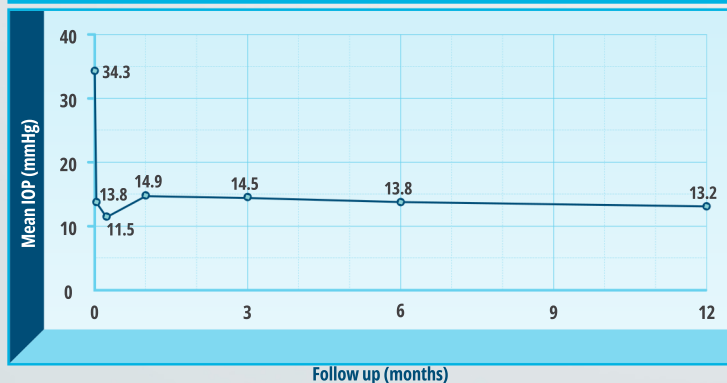

Reducción de medicación para el glaucoma post cirugía

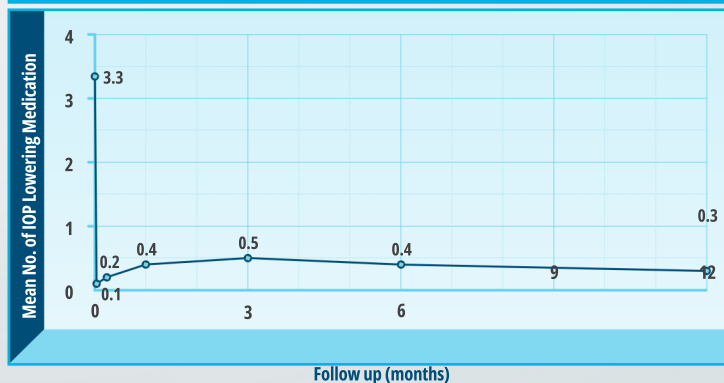

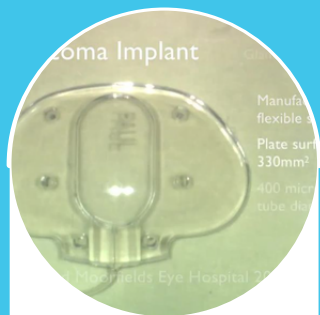

PAUL IMPLANT VIDEOS


CLICK HERE



El implante de glaucoma PAUL® es un dispositivo de drenaje diseñado para tratar el glaucoma al regular la presión intraocular en el ojo del paciente y prevenir una mayor progresión de la enfermedad.

ESTE PRODUCTO ES SÓLO DE USO MÉDICO

Contáctanos a
ventas@rcprovisionecuador.com

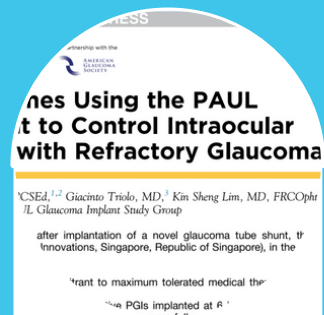

PAUL STUDY PAPERS

CLICK HERE



RC PROVISIÓN | La Garzota III etapa
Mz. 99 V19 Guayaquil | Ecuador
(04) 603-8107 // +593 99 904 4487
oficinarcprovision@yahoo.com
www.rcprovisionecuador.com